



### ICX A-dec compressa disinfettante

Disponibile per serbatoi da 0,7 e 2 litri, la compressa disinfettante ICX è racchiusa in pratiche confezioni monodose: nessun bisogno di dosare, miscelare o peggio ancora di sporcarsi con soluzioni liquide.

### EFFICACIA

- ICX è una compressa effervescente specificamente progettata per aiutare a prevenire contaminazioni e a mantenere pulite le linee idriche del riunito odontoiatrico. ICX mantiene puliti i serbatoi dell'acqua, elimina gli odori, e riduce la formazione di depositi nelle linee idriche
- ICX è sempre presente nell'acqua, ed è quindi una soluzione proattiva preventiva anziché reattiva
- Quattro mesi di studi condotti presso la University of Maryland e un test di laboratorio indipendente hanno dimostrato l'efficacia di ICX con svariati livelli di qualità dell'acqua

### SICUREZZA

- ICX non corrode le apparecchiature odontoiatriche
- ICX non è dannoso per i pazienti o l'équipe medica

### PROTEZIONE CONTRO RESIDUI

- ICX resta attiva per periodi di inutilizzo delle apparecchiature fino a due settimane
- Con ICX non è necessario spurgare le linee idriche la sera

### ADESIONE

- Test clinici hanno dimostrato che ICX non incide minimamente sul bonding dentinale

### FACILITÀ DI UTILIZZO

- All'inizio di ogni giornata lavorativa: versare la compressa nel serbatoio vuoto, riempire il serbatoio di acqua e collegarlo al riunito, attendere 60 secondi che la compressa si sciolga completamente



Marchio di conformità prodotto alla direttiva 93/42/CEE (classe IIa)

## MASSIMA TRANQUILLITÀ PER MEDICO E PAZIENTE

La nuova compressa disinfettante ICX A-dec è l'espressione più avanzata nel campo del controllo delle infezioni, grazie alla quarantennale ricerca sul campo che solo A-dec può vantare. ICX rappresenta un modo esclusivo ed efficace di mantenere perfettamente pulita la linea di approvvigionamento idrico delle unità odontoiatriche, oltre a essere incredibilmente semplice da usare: basta immettere una compressa in un serbatoio dell'acqua prima



di riempirlo. Nel dissolversi, la compressa rilascia nell'acqua componenti chimici che aiutano a prevenire la formazione di depositi a agenti contaminanti. Non occorre dosare né miscelare, la

compressa effervescente ICX fa tutto da sola.

ICX continua ad essere attiva nel sistema trattamento dopo trattamento. Ciò protegge la linea di approvvigionamento idrico da ulteriori contaminazioni e riduce (o può addirittura eliminare) la necessità di frequenti trattamenti intensivi. Poiché la concentrazione di componenti chimici nell'acqua è molto bassa, ICX non arreca alcun danno all'équipe medica, all'apparecchiatura o ai pazienti. Con ICX il protocollo di manutenzione della linea di approvvigionamento idrico è non solo semplice ed efficace, ma anche sicuro.