

Contenitore per l'eliminazione in sicurezza di rifiuti pungenti, taglienti e affilati. Realizzato in materiale plastico ecologico (polipropilene copolimero, colorato con masterbatch senza cadmio), colore giallo, forma tronco/conica (bidone) oppure quadrata a doppio guscio (box), apertura sul coperchio e chiusura di sicurezza irreversibile. Autoclavabile a 134°C.

Chiusura provvisoria

- > bidone: abbassare il coperchietto fino ad incastrare la linguetta sul bordino sporgente dell'apertura, in questo modo la riapertura è possibile alzando il coperchietto con la linguetta
- > box: ruotare il coperchio fino allo scatto

Chiusura definitiva

- Una volta raggiunto il livello di riempimento, dalla posizione di chiusura provvisoria.
- > bidone: premere fortemente con due dita sul **push** centrale, poi su quelli laterali fino ai click (in chiusura definitiva la linguetta rimane rialzata in posizione verticale)
 - > box: introdurre il perno nell'apposito foro e premere fortemente fino al click

Confezione: busta contenente 8 bidoni portarifiuti, 5 box portarifiuti

Misure: bidone da 0,7 litri, diametro 110/143 mm – bidone da 2 litri, diametro 140/212 mm – box da 1,5 litri, dimensioni 140 x 140 x h 110 mm

Codice	Capacità	Forma
10041249	0,7 litri	Bidone
10041250	2 litri	Bidone
10041251	1,5 litri	Box



PORTARIFIUTI ANTICONTAMINAZIONE BIDONE O BOX