

LMArte™ Cusp Misura

PRECISA VALUTAZIONE



LM-Arte™ Cusp Misura è uno strumento unico per misurare spessore e altezza della cuspidi al fine di valutare la necessità di una sua preparazione durante l'esecuzione di restauri adesivi.

PRECISA VALUTAZIONE

LM-Arte™ Cusp Misura

LMErgoSense® LM 468-469 ES

LMErgoMax™ LM 468-469 XSI

Strumento unico per misurare spessore e altezza della cuspidi al fine di valutare la necessità di una sua preparazione durante l'esecuzione di restauri adesivi. Ideale per valutare la resistenza della struttura del dente naturale e scegliere la tecnica restaurativa da utilizzare. Se la punta dello strumento a forchetta penetra fino ai relativi contrassegni, significa che la struttura del dente è troppo debole per sopportare le forze occlusali con un restauro diretto ed è necessario prendere in considerazione altre opzioni cliniche.

[Guarda il video per uso clinico.](#)



MD CE

STRATIFICAZIONI ESTETICHE DI SUCCESSO

LM-Arte™ è un set di strumenti innovativo dedicato al restauro estetico, specificamente progettato per la stratificazione di materiali compositi. Ciascuno strumento è associato a un codice colore ed è denominato in base alla specifica funzione, per consentire trattamenti restaurativi semplici, efficaci e veloci. Il design leggero ed ergonomico dell'impugnatura LM, abbinato all'elevata qualità dei materiali delle punte, garantisce ottime caratteristiche di sensibilità tattile e maneggevolezza per i migliori risultati clinici.

La serie di strumenti LM-Arte™ è stata sviluppata in collaborazione con **Styleitaliano™**, un gruppo di dentisti esperti che condividono con noi la passione per il miglioramento dell'odontoiatria.



 Scopri di più su
www.lm-dental.com/LM-Arte

