


# B.A. International BA Optima E+

NOVITÀ

Unità endodontica con  
localizzatore apicale BAE380R

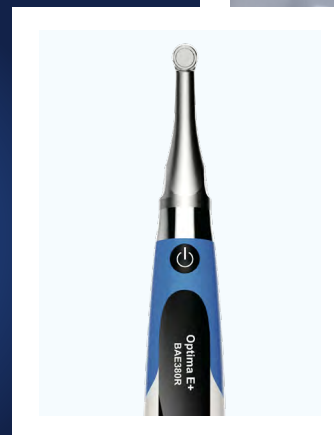



## Unità endodontica cordless BA Optima E+ BAE380R

Motore endodontico senza spazzole con localizzatore apicale incorporato, funzioni di reciprocazione e preimpostazioni per molti tipi di file, incluso EdgeEndo.

### Localizzatore apicale incorporato

Fornisce la determinazione di lunghezza integrata, la visualizzazione in tempo reale della localizzazione del file nel canale e funzioni di arresto automatico o inversione quando la lima raggiunge l'apice. L'unità può anche funzionare come localizzatore apicale autonomo utilizzando l'impostazione EAL.

### Modalità Safety Glide Path (reciprocazione)

Usando SGP (Safety Glide Path - percorso di scorrimento di sicurezza) o modalità reciprocazione di BAE380R si possono regolare gli angoli di rotazione. La reciprocazione consente al dentista una maggiore flessibilità nelle procedure endodontiche ed è utilizzata ampiamente in endodonzia.

### Motore senza spazzole

Il motore senza spazzole di BAE380R ottimizza l'efficienza dell'apparecchio nel tempo, oltre ad essere uno dei motori più silenziosi attualmente sul mercato, garantendo così un miglior comfort al paziente grazie ai bassi livelli di rumorosità.



# Altre caratteristiche di BA Optima E+ BAE380R

## Motore endodontico con contrangolo 6:1 girevole a 360°.

- Diametro (8 mm) e altezza (9,7 mm) della testa ridotti: maggiore visibilità durante il lavoro
- Programmi preimpostati per i file più utilizzati, incl. EdgeEndo
- Ricarica senza fili
- Baricentro frontale
- Funzioni di avvio e arresto automatico (per inserire/togliere il file nel/dal canale)
- Rotazione fluida e bassa rumorosità per il comfort del paziente
- Possibilità di selezionare la mano dominante da usare

## Unità endodontica BAE380R

Modello	Codice	Descrizione
BAE380R	BA182380	Motore endodontico con localizzatore apicale incorporato
-	BA182611	Testa a contrangolo solo per BAE380R

## Specifiche BAE380R

	BAE380R
Gamma di coppia	0.4Ncm-5.0Ncm (4mNm ~ 50mNm)
Gamma di velocità	100 giri/min. ~ 2500 giri/min.
Gamma di frequenza della ricarica senza fili	112-205KHz
Modalità di funzionamento	EAL, CW, CCW, SGP, ATR
Programmi di memoria personalizzabili	10
Preimpostazioni integrate del sistema endodontico	32
Specifiche della batteria	Litio 3,7 V /2000 mAh Ingresso: ~ 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz 0,4 A max Uscita 5 V CC / 1 A

## Modalità di funzionamento BAE380R

	BAE380R
EAL (localizzatore apicale elettronico)	Misurazione del canale - il manipolo del motore non è in funzione
CW (in senso orario)	Rotazione in avanti a 360°, in senso orario
CCW (in senso antiorario)	Rotazione in senso antiorario, usata per l'iniezione di idrossido di calcio o altri medicinali
SGP (Safety Glide Path)	Angolo di rotazione regolabile, l'angolo avanti deve essere uguale all'angolo indietro
ATR (Adaptive Torque Reverse)	Quando il carico del file supera il limite di coppia, il file ruota in modo alternato avanti/indietro secondo l'angolo impostato



**Dental Trey srl**

Via Partisani, 3

47016 Fiumana - Predappio (FC), Italia

T +39 0543 929111, F +39 0543 940659

commerciale@dentaltray.it - [www.dentaltray.it](http://www.dentaltray.it)

IT B.A. International si riserva il diritto di correggere le omissioni e gli errori di trascrizione in questo opuscolo. Tutte le immagini in questa pubblicazione hanno esclusivamente scopo illustrativo. N.B.: si applicano i termini e le condizioni standard di B.A. International.

B.A. International, Unit 7-10, Kingsthorpe Business Centre,  
Studland Road, Kingsthorpe, Northampton NN2 6NE, England.

+44 (0)1604 777 700 | [sales@bainternational.com](mailto:sales@bainternational.com) | [www.bainternational.com](http://www.bainternational.com)

