

Disinfettante per strumenti

CT Clean Instrument liquido concentrato



Liquido concentrato, privo di alcool e aldeidi, per la pulizia e la disinfezione di strumenti rotanti e chirurgici. Per ottenere una soluzione da 1 litro al 2% utilizzare 980 ml di acqua e 20 ml di concentrato. Non miscelare con altri disinfettanti o detergenti. Rinnovare regolarmente la soluzione (preferibilmente ogni giorno). Alla concentrazione indicata, il disinfettante può essere utilizzato nel bagno a ultrasuoni.

SPETTRO / TEMPI D'AZIONE

- ▶ Battericida, levurocida (*Candida albicans*), tuberculocida, efficace contro virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV). Batteri secondo VAH/DGHH, EN 13727, EN 14561 (alta carica biologica). Diluizione al 3% per 15 minuti – al 2% per 30 minuti – all'1% per 60 minuti
- ▶ Levurocida (*Candida albicans* secondo VAH/DGHH, EN 13624, EN 14562). Diluizione al 3% per 15 minuti – al 2% per 30 minuti – all'1% per 60 minuti
- ▶ TbB (Tubercolosi – Inattivazione secondo VAH/DGHH). Diluizione al 3% per 60 minuti
- ▶ Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV). Diluizione al 3% per 15 minuti – all'1% per 60 minuti
- ▶ Bagno a ultrasuoni (batteri e *Candida albicans* secondo VAH/DGHH) (alta carica biologica). Diluizione al 3% per 5 minuti

ATTENZIONE

Provoca gravi ustioni cutanee e oculari. Indossare guanti e indumenti protettivi. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente. Togliere eventuali lenti a contatto, continuare a sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. In caso di ingestione: sciacquare la bocca, non provocare il vomito. In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliere gli indumenti contaminati, sciacquare, in caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico.

CONTIENE Didecilmethylpolyoxyethylammoniumpropionat, N- (3-amminopropil) -N-dodecylpropane-1,3-diammina.

CONSERVAZIONE Conservare le confezioni perfettamente chiuse.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIB

CODICE WEB	CONFEZIONE
10046623	flacone da 1 litro
10046624	tanica da 5 litri

ACQUISTA
ONLINE

